

广告

粤械广审(文)第260715-07117号

一 次 性 使 用

子 | 宫 | 颈 | 扩 | 张

球 囊 导 管



粤械注准 20162181536

地址: 广东省广州市番禺区国贸大道南47号
POST CODE:511434 TEL: (+86)020-84758878

Add: 47 Guomao Avenue South, Panyu Guangzhou, China
FAX: (+86)020-84758224 WEB: www.welllead.com.cn

welllead 维力®

注: 禁忌内容或者注意事项详见说明书。

产品介绍

80mL球囊

Uterus子宫

Vagina阴道

医用硅胶材质
生物相容性好

产品使用方法

①使用窥阴器暴露宫颈，将球囊导管远端插入宫颈，并保证两个球囊都通过宫颈内口；

②用40ml生理盐水充盈子宫球囊（红色充盈口），充盈后，将球囊往后拉至子宫球囊紧贴宫颈内口；

③此时可见引导球囊位于宫颈外口，用20ml生理盐水充盈引导球囊，取出窥阴器，再注20ml生理盐水；

④确定将球囊置于宫颈两侧后，充入生理盐水（按每次20ml的注射量，逐渐将各球囊的容积增减值80ml）；

