

wellead 维力®

一 次 性 使 用

微创扩张引流套件

ClearPetra Access Sheath

适用范围

用于经皮穿刺扩张，
放置引流导管或手术器械一次性使用。



注册证编号：粤械注准20152031181

注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司


生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号 / 广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

禁忌内容或者注意事项详见说明书

产品介绍

产品由扩张管、鞘管、接头(直型或Y型)、密封帽(如有)、直型引流管、导引针、导丝、J型导管、助推管、引流瓶、定位环和手术刀组成,其中直型引流管、导引针、导丝、J型导管、助推管、引流瓶、定位环和手术刀为选配配件。

产品特点

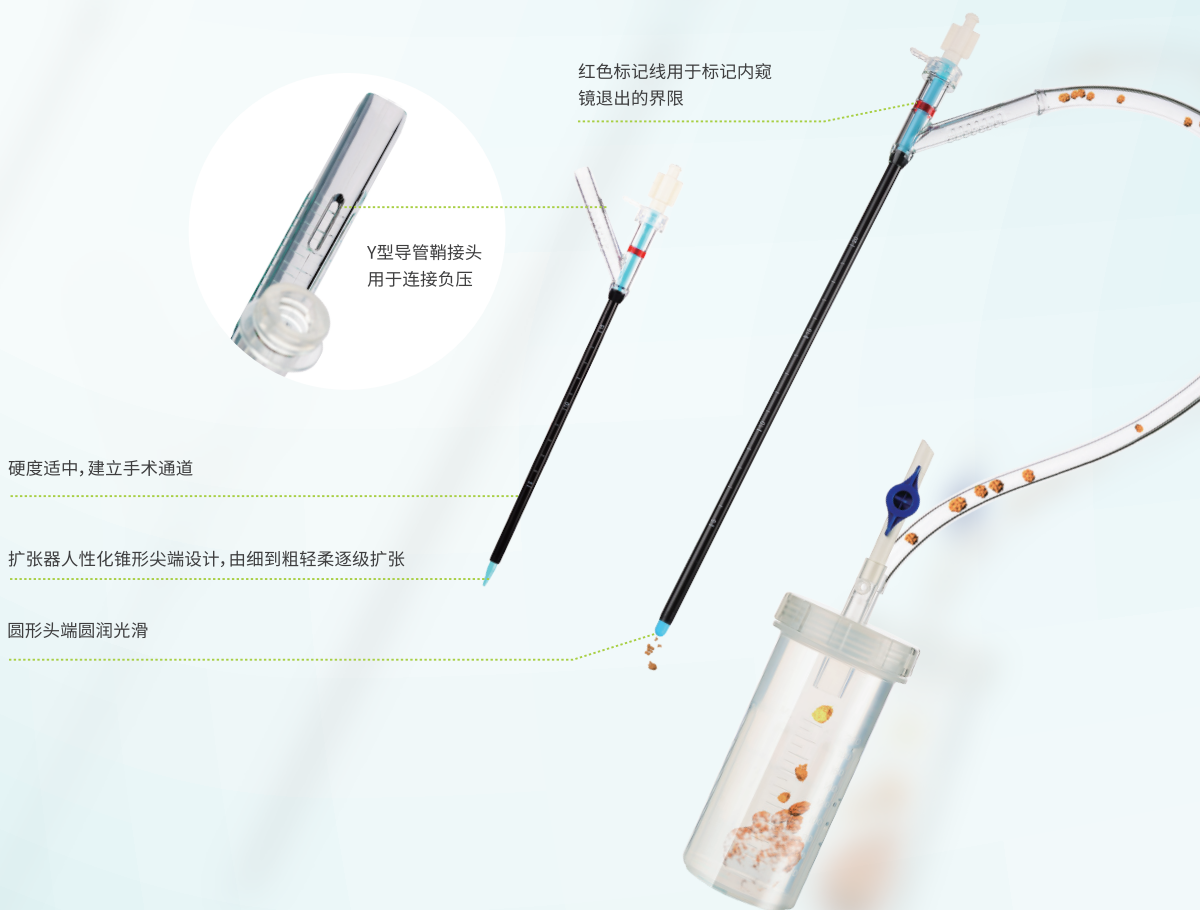

使用方法

- 1 在B超或X线透视下, 将导引针按拟定的穿刺点刺入皮肤, 进入肾集合系统;
- 2 穿刺成功后退出导引针针芯, 将导丝置入针管内;
- 3 用手术刀沿导引针针管切开皮肤及筋膜, 如果有手术瘢痕, 应继续切开深部瘢痕以便于扩张, 退出针管, 留置导丝在人体内;
- 4 扩张管保持与穿刺方向相同, 沿导丝以从小到大的顺序扩张组织, 直至扩张到合适规格;
- 5 将选定的合适规格的扩张管与相应规格的鞘管沿导丝一起置入肾集合系统, 退出扩张管, 留置鞘管, 盖上密封帽, 完成通道建立;
- 6 手术过程中, 引流液体可通过Y型接头的斜管引流;
- 7 引流管引流时间建议不超过24H。

规格型号

直型 8Fr、10Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、26Fr、28Fr、30Fr;

Y 型 10Fr×13cm、12Fr×13cm、14Fr×13cm、16Fr×13cm、18Fr×13cm、20Fr×13cm、22Fr×13cm
10Fr×17cm、12Fr×17cm、14Fr×17cm、16Fr×17cm、18Fr×17cm、20Fr×17cm、22Fr×17cm
10Fr×21cm、12Fr×21cm、14Fr×21cm、16Fr×21cm、18Fr×21cm、20Fr×21cm、22Fr×21cm