


一次性使用 下段弧形输尿管支架

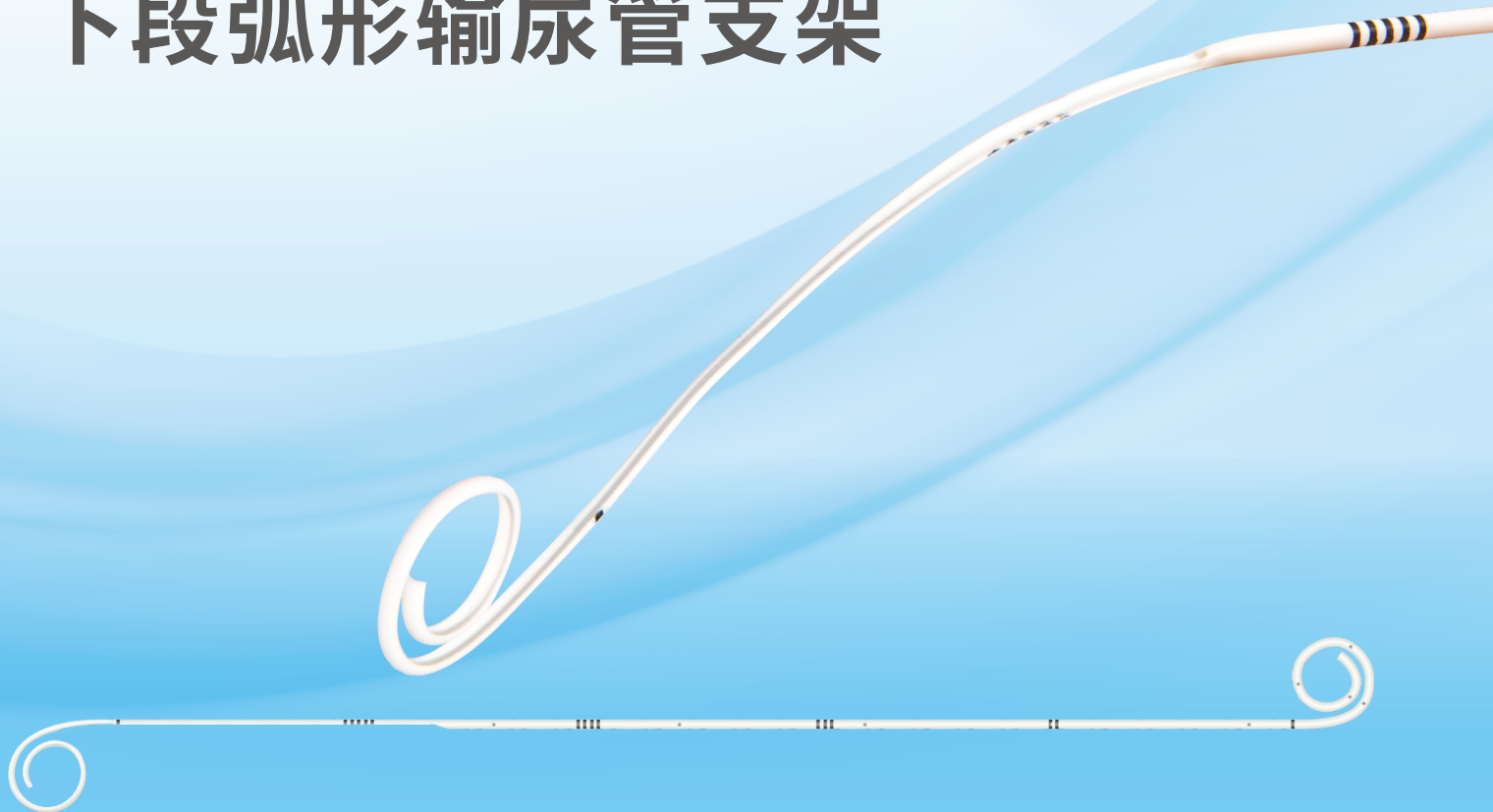


结构及组成

由下段弧形输尿管支架、助推管、导丝组成。

适用范围

通过对人体输尿管进行支撑和引流,用于治疗输尿管堵塞和狭窄。留置时间不超过30天。

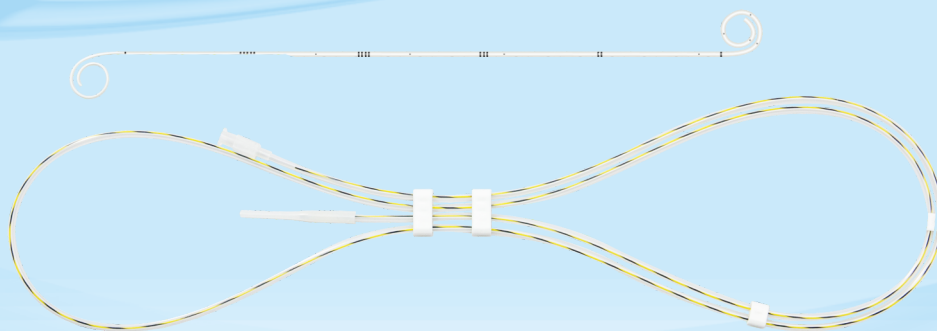

使用方法

- 1 根据患者情况选择合适规格型号的下段弧形输尿管支架；
- 2 使用本产品前应检查产品包装是否完好, 确认产品无异常；
- 3 支架逆行置入, 在直视下将导丝置入目标肾盏, 将导丝尾端与弧形输尿管支架的肾脏端连接, 沿导丝向前推送, 并借助助推管推送弧形输尿管支架上段和下段连接部位至输尿管中段的合适位置；
- 4 通过透视确认弧形输尿管支架的肾脏端卷曲部位于肾盂、膀胱端卷曲部位于膀胱后, 固定弧形输尿管支架位置, 将导丝退出；
- 5 拔除或更换弧形输尿管支架时, 可在膀胱镜下取出弧形输尿管支架。

输尿管支架规格

组成	规格
输尿管支架外径	6Fr
输尿管支架有效长度 (cm)	24、26、28、30
搭配导丝类型	S1(金属导丝) S2(涂覆导丝) S3(泥鳅直头导丝) S4(斑马导丝) S5(混合导丝)
搭配导丝尺寸	028、032、035、038
搭配助推管尺寸	6Fr

wellead