

wellead 维力®

输尿管扩张器套件

Ureteral Dilator Set

适用范围

输尿管扩张器套件用
于输尿管狭窄的扩张

使用方法

- ① 在x线或透视监视下，膀胱镜将0.038”导丝推送到预定部位，导丝进入输尿管，导丝越过狭窄部位
- ② 在固定导丝位置的同时退出膀胱镜，沿导丝以小到大的顺序推送尿道扩张器，直到扩张至合适的规格为止

规格型号

型号：单根装、套装

结构及组成

输尿管扩张器套件分为单跟和套装，扩张器包括6Fr、8Fr、10Fr、11Fr、12Fr、14Fr、16Fr、18F共9种，可单根使用或多根任意组成一套使用。

注册人名称：广州维力医疗器械股份有限公司

生产地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号/广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用，禁忌内容或者注意事项详见说明书

wellead 维力®