

wellead 维力®

一次性使用

输尿管导引鞘

Ureteral Access Sheath

适用范围

用于在泌尿系统内窥镜检查时，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道

结构及组成

直型由鞘管(内嵌弹簧)、扩张器导管、鞘管接头、扩张器导管接头，接头连接器和导丝组成；

直型双腔由鞘管(内嵌弹簧)、双腔扩张器导管、鞘管接头、扩张器导管接头(直型双腔)、接头连接器光纤固定接头、带鲁尔接口Y型接头和导丝组成；

Y型及Y型-II 单腔由鞘管(内嵌弹簧)、扩张器导管、鞘管接头(Y型)、扩张器导管接头，密封帽和导丝组成。

Y型-I双腔及Y型-II 双腔由鞘管(内嵌弹簧)、双腔扩张器导管、鞘管接头(Y型)、扩张器导管接头(Y型双腔)密封帽、光纤固定接头、带鲁尔接口Y型接头和导丝组成。

其中，导丝为选配件。



使用方法

- 1 将扩张管和鞘管作为一整体沿导丝推送进输尿管；
- 2 将输尿管导引鞘固定于原位的同时，松开接头，抽出扩张管；
- 3 导入所需内窥镜或手术器械。

规格型号

直型： 10Fr_x13cm、10Fr_x20cm、10Fr_x28cm、10Fr_x35cm、10Fr_x45cm、10Fr_x55cm、
12Fr_x13cm、12Fr_x20cm、12Fr_x28cm、12Fr_x35cm、12Fr_x45cm、12Fr_x55cm、
14Fr_x13cm、14Fr_x20cm、14Fr_x28cm、14Fr_x35cm、14Fr_x45cm、14Fr_x55cm；

直型双腔： 12Fr_x35cm、12Fr_x45cm、14Fr_x35cm、14Fr_x45cm；

Y 型： 9.5Fr_x36cm、9.5Fr_x40cm、9.5Fr_x46cm、9.5Fr_x50cm、9.5Fr_x55cm。
10Fr_x13cm、10Fr_x26cm、10Fr_x36cm、10Fr_x40cm、10Fr_x46cm、10Fr_x55cm、
11Fr_x13cm、11Fr_x26cm、11Fr_x36cm、11Fr_x40cm、11Fr_x46cm、11Fr_x55cm、
12Fr_x13cm、12Fr_x26cm、12Fr_x36cm、12Fr_x40cm、12Fr_x46cm、12Fr_x55cm、
13Fr_x13cm、13Fr_x26cm、13Fr_x36cm、13Fr_x40cm、13Fr_x46cm、13Fr_x55cm、
14Fr_x13cm、14Fr_x26cm、14Fr_x36cm、14Fr_x40cm、14Fr_x46cm、14Fr_x55cm；

Y型-I 双腔： 10Fr_x26cm、10Fr_x36cm、10Fr_x40cm、10Fr_x46cm、10Fr_x50cm、
11Fr_x26cm、11Fr_x36cm、11Fr_x40cm、11Fr_x46cm、11Fr_x50cm、
12Fr_x26cm、12Fr_x36cm、12Fr_x40cm、12Fr_x46cm、12Fr_x50cm、
13Fr_x26cm、13Fr_x36cm、13Fr_x40cm、13Fr_x46cm、13Fr_x50cm、
14Fr_x26cm、14Fr_x36cm、14Fr_x40cm、14Fr_x46cm、14Fr_x50cm；

Y型-II 单腔： 9.5Fr_x36cm、9.5Fr_x40cm、9.5Fr_x46cm、9.5Fr_x50cm、9.5Fr_x55cm、
10Fr_x36cm、10Fr_x40cm、10Fr_x46cm、10Fr_x50cm、10Fr_x55cm、
11Fr_x36cm、11Fr_x40cm、11Fr_x46cm、11Fr_x50cm、11Fr_x55cm、
12Fr_x36cm、12Fr_x40cm、12Fr_x46cm、12Fr_x50cm、12Fr_x55cm、
13Fr_x36cm、13Fr_x40cm、13Fr_x46cm、13Fr_x50cm、13Fr_x55cm；

Y型-II 双腔： 10Fr_x36cm、10Fr_x40cm、10Fr_x46cm、10Fr_x50cm、10Fr_x55cm、
11Fr_x36cm、11Fr_x40cm、11Fr_x46cm、11Fr_x50cm、11Fr_x55cm、
12Fr_x36cm、12Fr_x40cm、12Fr_x46cm、12Fr_x50cm、12Fr_x55cm、
13Fr_x36cm、13Fr_x40cm、13Fr_x46cm、13Fr_x50cm、13Fr_x55cm。

