

wellead 维力®

一次性使用输尿管 球囊扩张导管套件

Ureteral Balloon Dilation Catheter

穿 越 无 阻 - 扩 张 自 如



适用范围

供医疗部门用于输尿管狭窄的腔内扩张,或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张

结构及组成

由球囊扩张导管、压力泵、导丝和注射器组成;其中球囊扩张导管为基本配置,由接头、导管和球囊组成;压力泵、导丝和注射器为可选配置

使用方法

- 1 将0.038"导丝推送至预定部位;
- 2 在监视下,经导丝送入球囊扩张导管;
- 3 连接压力泵和导管充盈腔,抽取导管内空气,确保导管处于真空状态后关闭双通阀开关;
- 4 断开压力泵和双通阀的连接,用无菌液体充盈压力泵;
- 5 重新连接压力泵和双通阀,充盈球囊;
- 6 关闭压力泵开关,顺时针旋转压力泵的活塞手柄继续加压,直至达到适当的充盈压力(切勿超过额定爆破压力20ATM),维持压力并充分扩张;
- 7 完成扩张后,利用压力泵回抽,直至将球囊内液体排空,断开压力泵和导管的连接,缓慢退出导管。

规格型号

4.0x40、4.0x60、4.0x100
5.0x40、5.0x60、5.0x100
6.0x40、6.0x60、6.0x100
7.0x40、7.0x60、7.0x100
8.0x40、8.0x60、8.0x100
10.0x40、10.0x60、10.0x100



注册人名称:广州维力医疗器械股份有限公司

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号/广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书

wellead 维力®