


广告

粤械广审(文)第291027-10969号

wellead 维力®

一次性使用输尿管 球囊扩张导管套件(B型)

Ureteral Balloon Dilation Catheter

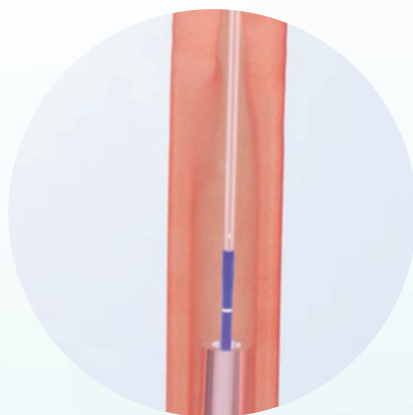

镜下直视操作

20ATM



注册证编号:粤械注准20152140131

使用方法

- ① 导管插入:**通过内窥镜器械通道将B型球囊扩张导管在直视下缓慢越过扩张部位,并推送至预定扩张的部位。
- ② 定位:**根据球囊扩张导管前端刻线标记确定导管处于正确的扩张位置;必要时可在X线辅助下再次确定球囊扩张导管定位正确。
- ③ 充盈球囊:**用无菌液体充盈压力泵,排空压力泵内空气;连接压力泵和导管充盈腔,打开压力泵上的开关阀,充盈球囊;关闭压力泵开关,顺时针旋转压力泵的活塞手柄继续加压,直至达到适当的充盈压力(16-20ATM)。
- ④ 扩张狭窄:**维持压力并充分扩张3-5min;在内窥镜直视下可以看到狭窄段输尿管内径逐渐增大。
- ⑤ 回抽球囊并移除:**完成扩张后,打开压力泵上的开关阀,将球囊内液体回抽至球囊贴合状态,断开压力泵与球囊扩张导管的连接,缓慢退出球囊扩张导管。



结构及组成

由球囊扩张导管、压力泵、导丝(B型不适用)和注射器组成;其中球囊扩张导管为基本配置,由接头、导管球囊和球囊护套管组成,球囊护套管仅用于包装保护球囊;压力泵、导丝(B型不适用)和注射器为可选配置注射器不带注射针头,非注射人体使用。产品经环氧乙烷处理,无菌提供,一次性使用。

适用范围

供医疗部门用于输尿管狭窄的腔内扩张,或在输尿管镜检查或结石操作之前进行输尿管扩张

规格型号

B型 4.0*60	B型 6.0*40
B型 4.0*100	B型 6.0*60
B型 5.0*40	B型 6.0*100
B型 5.0*60	B型 7.0*60

