

wellead 维力®

尿动力测压管

Urodynamics Catheters

适用范围

该尿动力测压管与尿动力仪配套,供临床尿动力检测用。

结构及组成

尿动力测压管按结构可分为:双腔型、双腔猪尾巴型和三腔型三种。

双腔型由双腔导管、分支接头、分支管、接头、保护帽、外套管组成,选配导引钢丝;

双腔猪尾巴型由双腔弯头导管、分支接头、分支管、接头、保护帽、导引钢丝组成;

三腔型由三腔导管、分支接头、分支管、接头、保护帽、外套管组成,选配导引钢丝。



规格型号

型号:双腔型、双腔猪尾巴型、三腔型。

规格:双腔型:6Fr, 7Fr, 8Fr; 双腔猪尾巴

型:6Fr, 8Fr; 三腔型: 7Fr.

使用方法


步骤

- 1) 根据实际情况选择合适规格型号的尿动力测压管;
- 2) 使用本产品前,应检查产品包装是否完好,确认产品无异常;
- 3) 从开口处撕开包装取出本产品,将尿动力测压管经尿道插入至膀胱;
- 4) 将尿动力测压管灌注腔道与灌注系统连接,测量腔道与压力传感器连接,进行压力检测;
- 5) 检测结束后,取出尿动力测压管.

连接示意图


双腔猪尾巴型尿动力测压管

猪尾巴形态增加导管
在膀胱内留置的稳定性

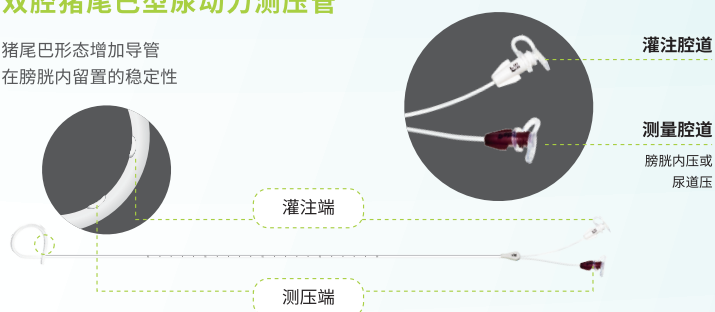

双腔型尿动力测压管

菱形孔设计, 提高灌注与测量的准确性
表面光滑, 减少了对粘膜的损伤

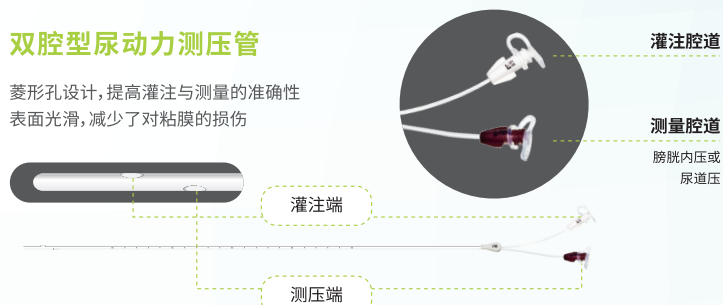

三腔型尿动力测压管

减少调整导管位置
进行膀胱测压和尿道测压

