


冲吸式口护吸痰管

Suction Toothbrush For Oral Hygiene

- 可冲
- 可吸
- 可控
- 单人操作

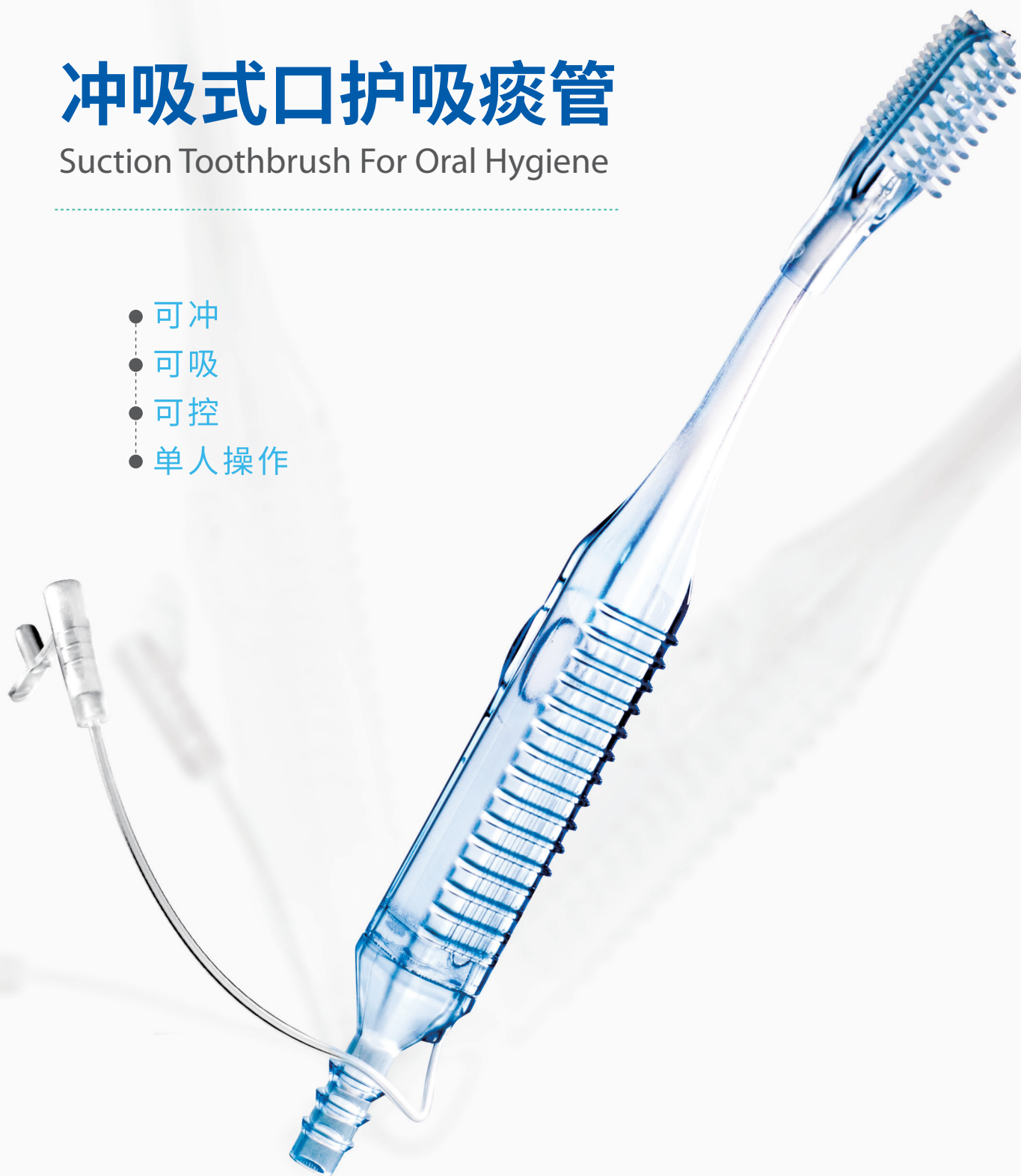

包装:20PCS/盒、100PCS/箱

粤械注准20172081854

地址: 广东省广州市番禺区国贸大道南47号
POST CODE:511434 TEL: (+86)020-84758878

Add: 47 Guomao Avenue South, Panyu Guangzhou, China
FAX: (+86)020-84758224 WEB: www.wellead.com.cn

wellead 维力®

注:禁忌内容或者注意事项详见说明书。

产品介绍

注册类别:二类
型号规格:成人型

产品特点

A 硅胶牙刷头

柔软舒适;正反面不同设计,满足不同的使用场景

B 冲洗腔

可连接输液器或注射器

C 负压吸引腔

连接负压,进行吸引

D 控压孔

控制负压

使用指南

- 1 连接好负压装置及输液装置;
- 2 负压装置连接到负压吸引腔,输液装置连接到冲洗腔,确认连接紧密;
- 3 调节负压到合适的范围;
- 4 先用吸痰管清理口腔分泌物,冲洗腔连接好清洁液体,如有必要也可在牙刷头处涂上清洁用物,进行刷洗;
- 5 然后打开输液装置,速度控制在80滴左右,边刷边吸。经口气管插管机械通气患者,先对侧后近侧,依次刷洗牙齿、颊部、舌面、舌下、硬腭及气管插管表面,按需进行口鼻、气道、声门下吸引;
- 6 待口腔清洁干净后,先关输液开关,再关负压;
- 7 将口护吸痰管与负压装置断开,垃圾按医疗废物处理。

C 负压吸引腔

D 控压孔

B 冲洗腔

牙刷头 A