

一次性使用

气传导尿动力测压导管



产品规格


2Q-7Fr、3Q-7Fr、PC2-2Q-7Fr、PC4-2Q-7Fr、PC2-3Q-7Fr、
PC4-3Q-7Fr

适用范围

与尿动力仪配套，供临床尿动力检测用。

结构及组成

一次性使用气传导尿动力测压导管由测压管和连接管(选配)组成。测压管分为双腔球囊型测压导管和三腔球囊型测压导管。测压管由接头、管体和球囊组成，由聚碳酸酯PC、聚酰胺PA、聚氨酯PU制成；连接管有四种类型(连接管、灌注连接管I型、泵管、三通延长管)，由管体和接头组成，四种管体均由聚氯乙烯PVC制成，接头为外购部件。

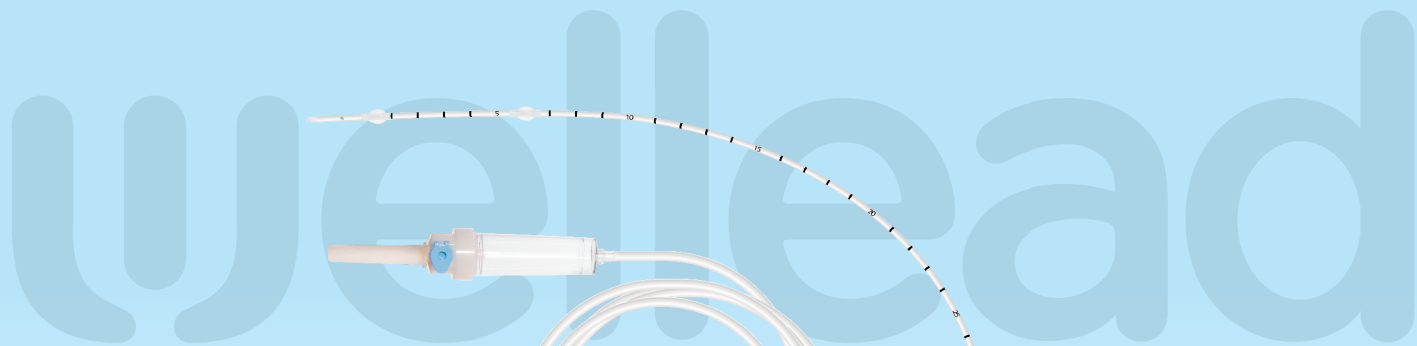

使用说明

- 1 根据实际情况选择合适规格型号的一次性使用气传导尿动力测压导管；
- 2 使用本产品前，应检查产品包装是否完好，确认产品无异常；
- 3 从开口处撕开包装取出本产品，将一次性使用气传导尿动力测压导管经尿道插入至膀胱；
- 4 将一次性使用气传导尿动力测压导管灌注接头与灌注系统连接；
- 5 若选配连接管使用，分别将灌注连接管I型、泵管、连接管依次连接固定，将灌注连接管I型与灌注系统连接，连接管与灌注接头连接；
- 6 将膀胱测压接头（黄色）与测量膀胱压的压力传感器连接，进行压力检测；
- 7 若选择三腔球囊型测压管，将膀胱测压接头（黄色）和尿道测压接头（绿色）分别与尿动力学分析系统上测量膀胱压和测量尿道压的压力传感器连接，进行压力检测；
- 8 若有需要，可通过三通延长管连接测压接头和压力传感器；
- 9 检测结束后，取出一次性使用气传导尿动力测压导管。

注意事项

- 1 使用前应仔细阅读使用说明书，并按临床操作程序在有效期内使用；
- 2 使用前应检查产品的完好性，包装一经打开，立即使用，如果包装破损或产品有损坏，请勿使用；
- 3 本产品推荐的球囊充气量为0.02mL，请根据临床实际情况对充气量进行适当调整；
- 4 本产品仅供一次性使用，禁止二次灭菌；
- 5 本产品经环氧乙烷灭菌，过期产品严禁使用；
- 6 本产品的使用过程应由专业人员进行实施；
- 7 产品使用后应按医院或环保部门要求处置废弃物；
- 8 本产品可与配备了符合标准鲁尔接头配件，具备气体压力测量系统的尿动力仪（如莱博瑞等）兼容使用；
- 9 生产日期见标签。

使用期限

三年

INSTRUCTIONS