


一次性使用

气传导直肠测压导管

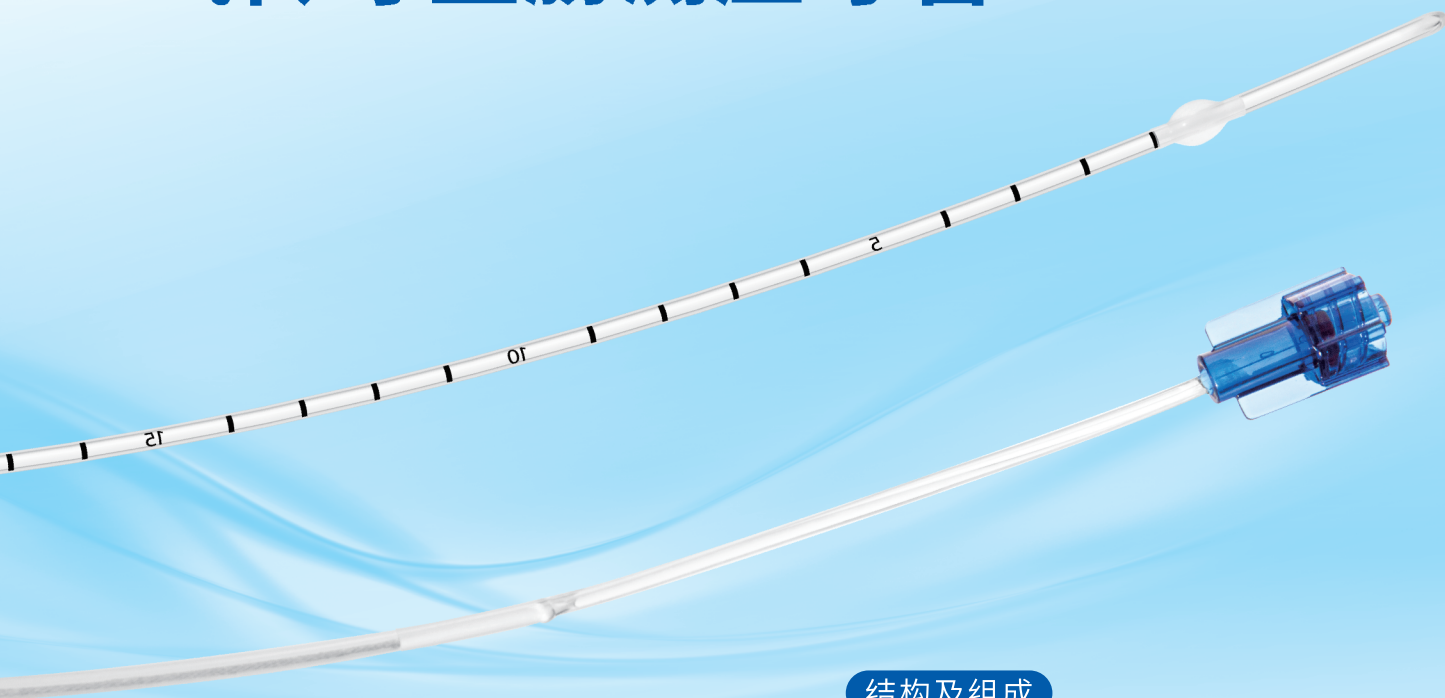

结构及组成

一次性使用气传导直肠测压导管由主管、球囊、直肠测压接头、护帽、钢丝组成，由聚酰胺PA、聚氨酯PU、聚碳酸酯PC、聚丙烯PP以及不锈钢制成。

适用范围

适用于与尿动力学分析仪配套使用，用于在临床上对直肠内压力进行测量。

wellead

【注册人/生产企业名称】广州维力医疗器械股份有限公司

【注册人/生产企业住所】广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

【生产地址】广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

【生产许可证编号】粤食药监械生产许20010161号

【医疗器械注册证编号】粤械注准20252140542

【联系方式】电话：020-84758878 传真：020-84758224 网址：<http://www.wellead.com.cn>

【售后服务单位】广州维力医疗器械股份有限公司

注：禁忌内容或者注意事项详见说明书。



wellead[®]
维力医疗

INSTRUCTIONS

使用方法

- 1 根据实际情况选择合适规格型号的一次性使用气传导直肠测压导管；
- 2 使用本产品前，应检查产品包装是否完好，确认产品无异常；
- 3 从开口处撕开包装取出本产品，用润滑油润滑球囊后，将一次性使用气传导直肠测压导管插入至直肠壶腹，并按需要进行定位，确保球囊全长位于直肠腔内；
- 4 将直肠测压接头与压力传感器连接，进行压力检测；
- 5 检测结束后，退出一次性使用气传导直肠测压导管。

产品规格 1Q-7Fr

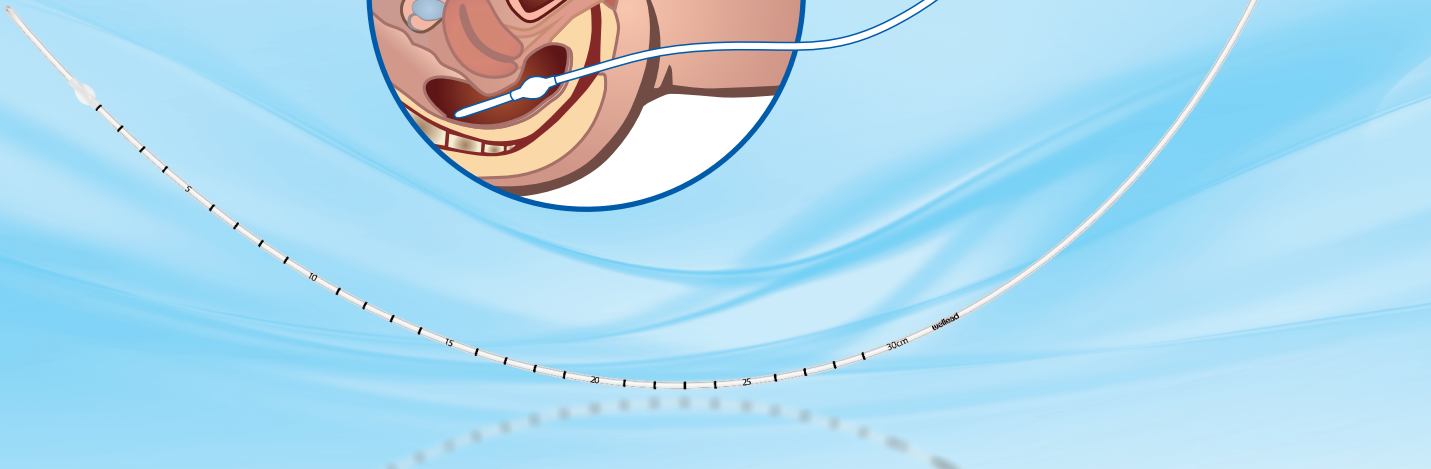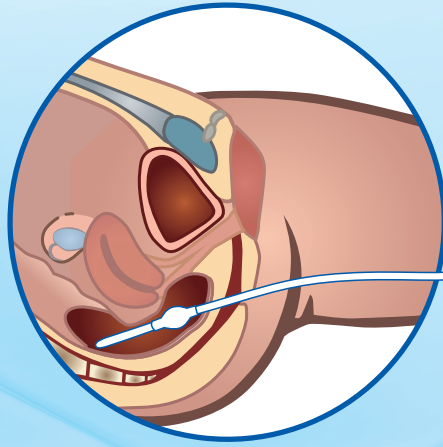

wellead