

广告

粤械广审(文)第281217-12708号

wellead 维力®

一 次 性 使 用

输尿管支架

Uridynamic Catheters

适用范围

用于经膀胱镜到达肾脏,将尿液经J型导管
从肾脏引到膀胱。供尿路支撑,引流用。



注册证编号:粤械注准20182141074

规格型号

普通型

5Fr、6Fr、7Fr、8Fr、9Fr



多圈型

4Fr、4.6Fr、5Fr、6Fr、7Fr、8Fr



海马型

7/12Fr A型、7/12Fr B型、7/12Fr C型



梅花型

7Fr



使用方法

- 1 根据患者情况选择合适规格型号的输尿管支架;
- 2 在直视下,将导引丝置入目标位置,沿导丝推送输尿管支架,并借助助推管将输尿管支架送入合适位置;
- 3 通过透视确认输尿管支架两端卷曲分别置于肾盂和膀胱中后,固定输尿管支架位置,将导引丝退出;
- 4 拔除或更换输尿管支架时,可在膀胱镜下或直接牵拉导引线取出输尿管支架。



注册人名称:广州维力医疗器械股份有限公司

生产地址:广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号/广州市番禺区化龙镇国贸大道南45号、47号

请仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书

wellead 维力®